

## Nastavljivo laparoskopsko prijemalo


(št. 33181)

### Razbremenjeno osebje

V kombinaciji z laparoskopskimi držali Thompson lahko v nastavljivo laparoskopsko prijemalo namestite različno velike laparoskope. Nastavljivo laparoskopsko prijemalo je mogoče enostavno nastaviti tako, da se prilega laparoskopom premera 5–6 mm in 10–11 mm, ter zagotavlja trdno namestitev laparoskopa, kar razbremeni osebje.

### PREDNOSTI

- Mogoča nastavitev za namestitev različnih velikih laparoskopov
- Trdna in varna namestitev palice laparoskopa
- Hiter priklop v laparoskopska držala Thompson

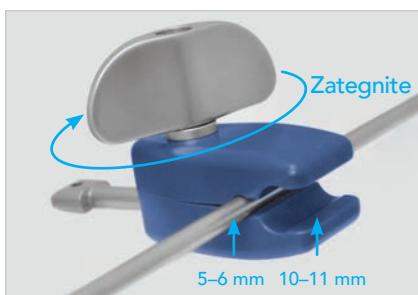

### 1. Korak


Pritrdite na palico laparoskopa (premera 5–6 mm ali 10–11 mm) tako, da gumb obračate v smeri vrtenja urnega kazalca in jo s tem zategnete.

### OPOMBA: NE ZATEGNITE PREVEČ.



### 2. Korak

Vstavite v distalni konec laparoskopskega držala.

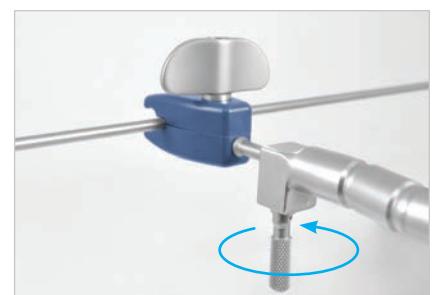

### 3. Korak

Viseči klin obračajte v smeri vrtenja urnega kazalca, da zategnete in zagotovite namestitev laparoskopa brez podpore osebja.



#### PODATKI ZA NAROČANJE:

Nastavljivo laparoskopsko prijemalo za premere 5–6 mm/10–11 mm (št. 33181)

 **Thompson**  
SURGICAL INSTRUMENTS  
10341 East Cherry Bend Road  
Traverse City, Michigan 49684  
tel.: 231.922.0177  
faks: 231.922.0174  
[thompson surgical.com](http://thompson surgical.com)



#### OBVESTILO:

Priporočeno za uporabo z zgibno ročico ali upogljivim laparoskopskim držalom skupaj s pritrdilnim nastavkom za mizo.

EC REP

Emergo Europe  
Prinsesegracht 20  
2514 AP Haag  
NIZOZEMSKA

 0297

Rev. E  
110620  
asgss-sl