## Thompson Retractor ••

## 可调内镜夹持器 (#33181)

## 解放医护人员的双手

当可调内镜夹持器与 Thompson 腹腔镜支架结合使用时可用于固定各种尺寸的内镜。可调内镜夹持器经简单调节即适合固定5-6mm 和 10-11mm 的内镜,并可将其紧固夹持在合适位置,从而解放了医护人员的双手。


#### 优点

- 具有可调节功能, 便于固定各种尺寸的内镜
- 紧固夹持在内镜轴上并为其提供保护
- 快速连接至 Thompson 腹腔镜支架



"Thompson Surgical 提供了最为方便省事的多功能牵开器。"

- Michael Nizzi, DO, FACOS

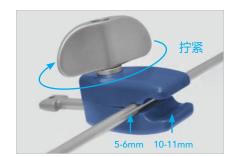

#### 第1步

连接至内镜轴 (5-6 或 10-11mm),顺时针旋转旋钮拧紧。

注: 切勿拧得过紧



#### 第2步

插入腹腔镜支架的远端。



#### 第3步

顺时针旋转悬挂旋钮固定住内镜,从而 解放双手。



#### 订购信息

可调内镜夹持器 5-6mm / 10-11mm #33181



#### 注意:

建议与铰接臂或挠性腹腔镜支架连同手术台支架结合使用。



# Thompson SURGICAL INSTRUMENTS 10341 East Cherry Bend Road

SURGICAL INSTRUMENTS 10341 East Cherry Bend Road Traverse City, Michigan 49684 电话: 231.922.0177 传真: 231.922.0174

thompsonsurgical.com

EC REP

Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague



E版 110620 asgss-zh



© 2020 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® ◎、PLA®和 Thompson "T Circle"徽标 ♣是 Thompson Surgical Instruments, Inc. 的注册商标。

专利信息: trpat.com 其他专利申请中。