


Manual de utilizador do Elevador de Fémur Thompson: INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO ELEVADOR DE FÉMUR THOMPSON

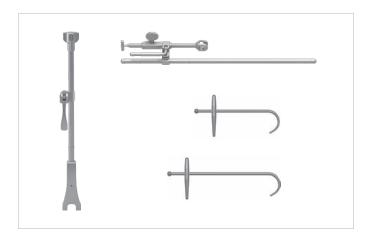

## Instruções de Montagem do Elevador de Fémur





PRECAUÇÃO: Evitar comprimir o corpo do doente com componentes estruturais para prevenir danos nos nervos.



O Thompson Retractor é fornecido em estado não estéril. Consultar as IDU do Thompson Retractor para instruções de limpeza, esterilização e cuidado.

Consultar as Instruções de Utilização do Thompson Retractor para avisos e precauções adicionais.

Para outros Sistemas Thompson Retractor, consultar os respetivos Manuais de Utilizador.

Legenda dos símbolos:













## Se utilizar uma mesa Hana<sup>®</sup>, ou um sistema de posicionamento de pernas, como o Arch

Colocar o extensor de calha sobre o pano estéril e rodar o botão superior no sentido dos ponteiros do relógio para apertar.



Passo 1: Grampo da calha

Coloque o Elite Rail Clamp na calha sobre o pano estéril e rode o manípulo no sentido horário para apertar.



Passo 2: Braço reto

Insira o braço reto na junta no Elite Rail Clamp, posicione e vire o manípulo da junta de came para bloquear.



Passo 3: Manípulo do elevador

Posicione o manípulo do elevador e tranque no lugar, fechando a junta.



Passo 4: Gancho

Utilizar o manípulo em T na extremidade proximal do gancho do fémur para posicionar o gancho no lugar. Insira a bola no manípulo do braço do elevador para segurar no lugar.



Passo 5: Retração

Se for necessária uma retração adicional, utilizar o manípulo micro ajustável rodando o botão para se retrair mais. Prima o trinco para libertar a retração.



Thompson To Surgical Instruments

10341 East Cherry Bend Road Traverse City, Michigan 49684 telefone: +1 231.922.0177 fax: +1 231.922.0174 thompsonsurgical.com



Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP Haia PAÍSES BAIXOS

