

Thompson Retractor



Uncompromised Exposure™



Thompson Retractor उपयोगकर्ता मैनुअल:

THOMPSON जनरल + स्पाइन रिट्रैक्टर सिस्टम को सेट अप करने के निर्देश

हिंदी

विषय सूची


चेतावनियां + सावधानियां.....	3
यूनीलेटरल सिस्टम	4-5
यूनीलेटरल एबडोमिनल	4-5
यूनीलेटरल हेड + नेक	4-5
तिथोथोमी	4-5
प्रोन + प्रोन जैक नाइफ.....	4-5
फ्लेंक	4-5
बाइलेटरल एबडोमिनल सिस्टम	6-7
बाइलेटरल हेड + नेक सिस्टम	8
सहायक उत्पाद	9
Infinite Height रेल क्लैप.....	9
रेल एक्सटेंडर	9
जैकसन स्पाइन फ्रेम अडैप्टर	9
हैंडल + ब्लेड	10-11
S-Lock.....	10
विचक एंगल.....	10
Micro-Adjustable.....	10
विलप-ऑन हैंडल जोड़ना + हटाना	11
हैंडल + स्लाइड-ऑन जॉइंट	11




नोट

चूंकि हम लगातार सर्वोत्तम संभव उत्पाद प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं, अतः इस उपयोगकर्ता मैनुअल में मौजूद चित्र, प्राप्त उत्पाद से थोड़ा अलग दिख सकते हैं।

यूनीलेटरल सेट अप

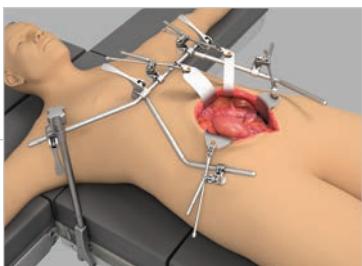


B

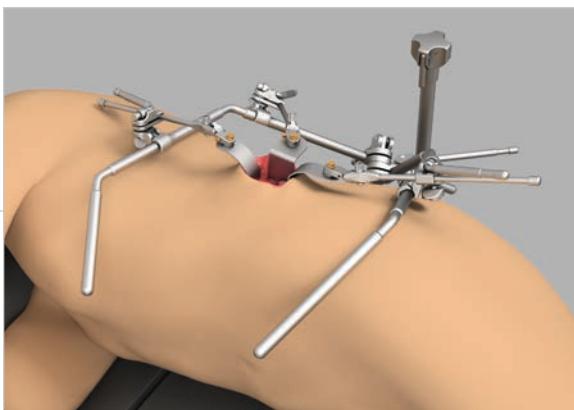

चरण 1: रेल क्लॅप

Elite Rail Clamp को सूक्ष्मजीवहीन ड्रेप पर रखें और ऊपरी घुंडी को घड़ी की दिशा में घुमा कर करें।

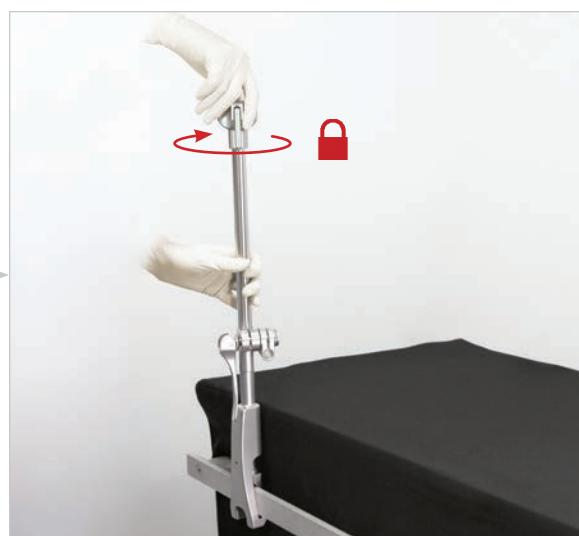

यूनीलेटरल सेट अप (जारी)

चरण 2: क्रॉसबार

क्रॉसबार को Elite Rail Clamp पर मौजूद जॉइंट में घुसाएं, सही स्थान पर लाएं, और कैम जॉइंट हैंडल को पलट कर लॉक कर दें।




(A) चरण 3: एंगल्ड आर्म

एंगल्ड आर्म को क्रॉसबार पर मौजूद जॉइंट में घुसाएं, सही स्थान पर लाएं, और कैम जॉइंट हैंडल को पलट कर लॉक कर दें। दूसरी एंगल्ड आर्म और क्रॉसबार जॉइंट के साथ यही क्रिया दोहराएं।





(B) चरण 3: किडनी सिस्टम एक्सटेंशन आर्म

एक्सटेंशन आर्म को क्रॉसबार पर मौजूद जॉइंट में घुसाएं, सही स्थान पर लाएं, और कैम जॉइंट हैंडल को पलट कर लॉक कर दें।

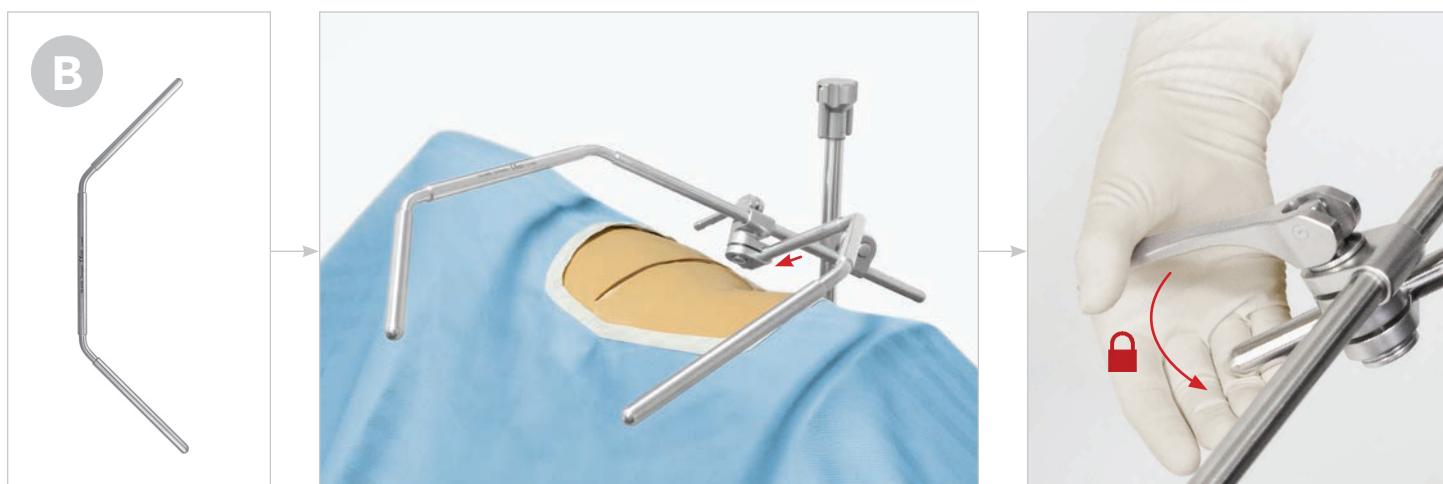

बाइलेटरल एबडॉमिनल सेट अप

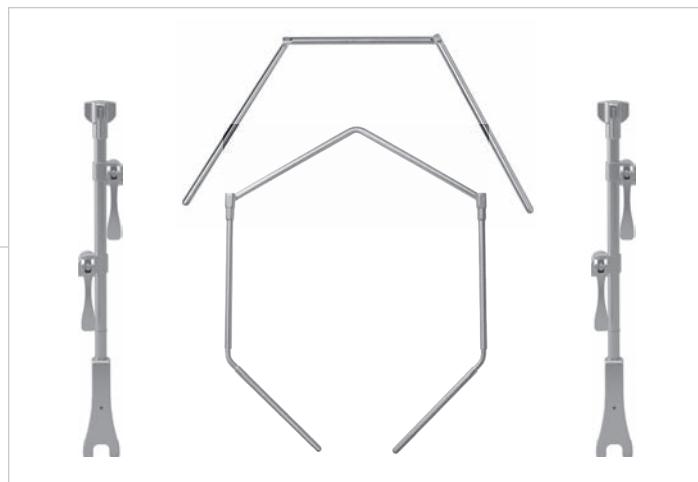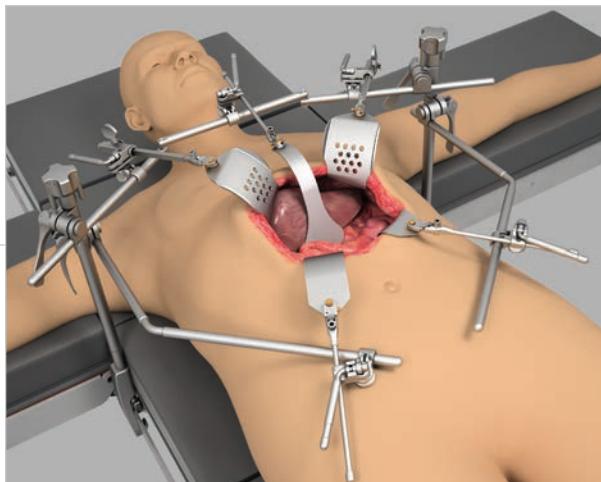

चरण 1: रेल क्लैप


Elite Rail Clamp को स्क्रमजीवहीन ड्रेप पर रखें और ऊपरी धुंडी को घड़ी की दिशा में धुमा कर करें। टेबल की दूसरी साइड पर भी यही क्रिया दोहराएं।



बाइलेटरल एबडॉमिनल सेट अप (जारी)

चरण 2: बाइलेटरल क्रॉसबार

एक सहायक की मदद से, बाइलेटरल क्रॉसबार के हरेक छोर को Elite Rail Clamp पर मौजूद ऊपरी जॉइंट में घुसाएं, सही स्थान पर लाएं, और कैम जॉइंट हैंडल को पलट कर लॉक कर दें।

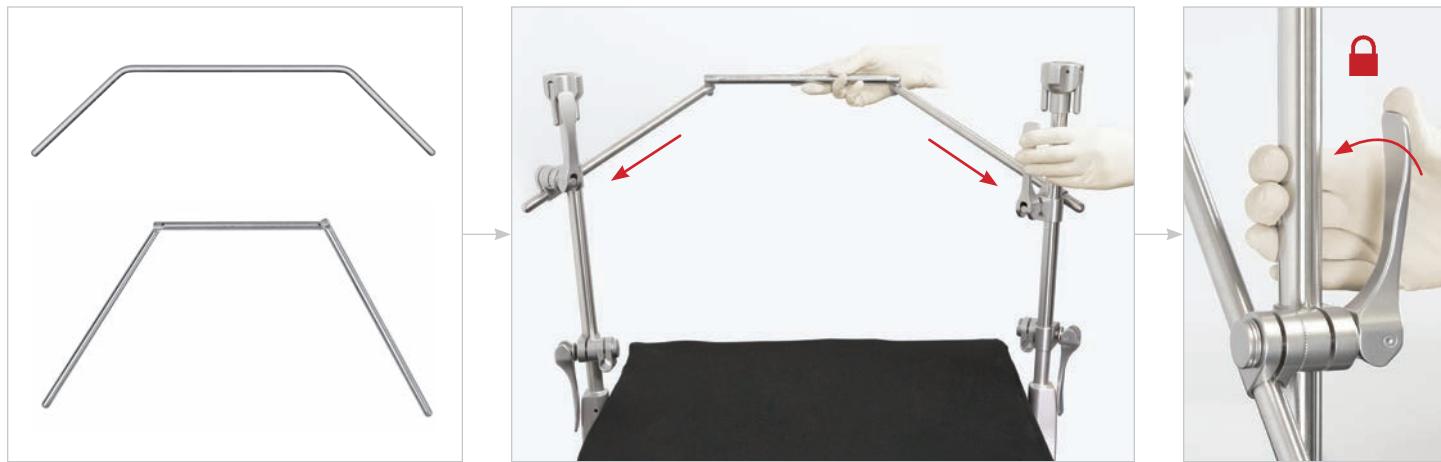

(A) चरण 3: एंगल्ड आर्म

एंगल्ड आर्म को Elite Rail Clamp पर मौजूद निचले जॉइंट में घुसाएं, सही स्थान पर लाएं, और कैम जॉइंट हैंडल को पलट कर लॉक कर दें। यदि वांछित हो तो दूसरी साइड पर भी यही क्रिया दोहराएं।






(B) चरण 3: लोअर एबडॉमिनल बार

एक सहायक की मदद से, लोअर एबडॉमिनल बार के हरेक छोर को Elite Rail Clamp पर मौजूद निचले जॉइंट में घुसाएं, सही स्थान पर लाएं, और जॉइंट हैंडल को पलट कर लॉक कर दें।




बाइलेटरल हेड एंड नेक सेट अप

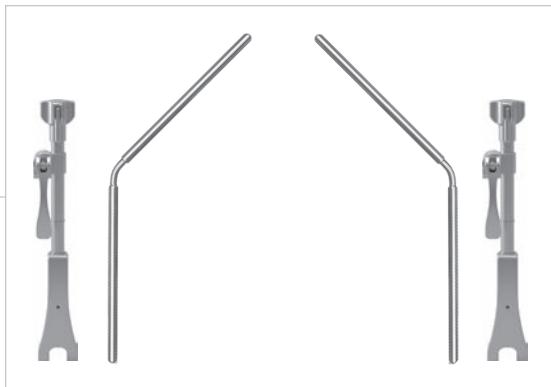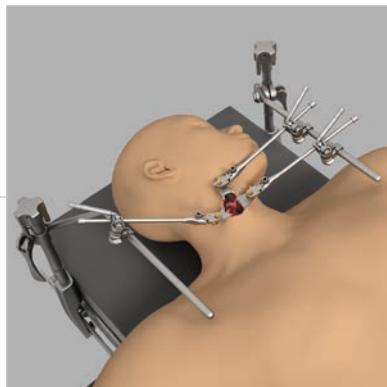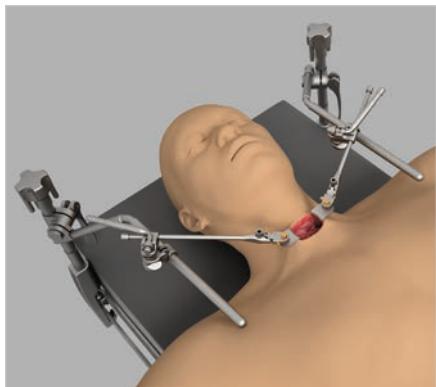



चरण 1: रेल क्लॅप

Elite Rail Clamp को स्क्रमजीवहीन ड्रेप पर रखें और ऊपरी घुंडी को घड़ी की दिशा में घुमा कर करें। टेबल की दूसरी साइड पर भी यही क्रिया दोहराएं।

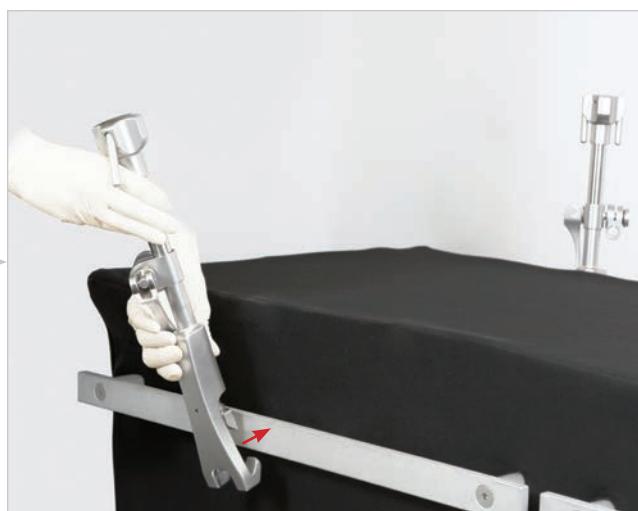

चरण 2: एंगल्ड आर्म

एंगल्ड आर्म को Elite Rail Clamp पर मौजूद जॉइंट में घुसाएं, सही स्थान पर लाएं, और कैम जॉइंट हैंडल को पलट कर लॉक कर दें। दूसरी साइड पर भी यही क्रिया दोहराएं।

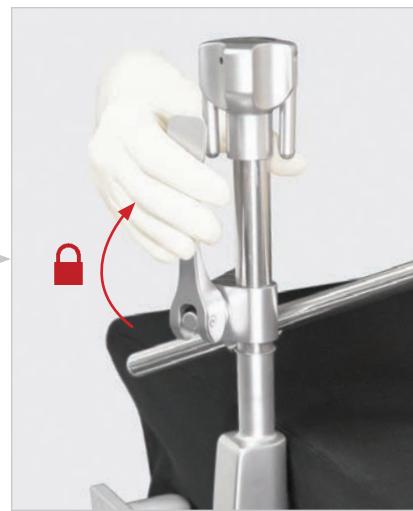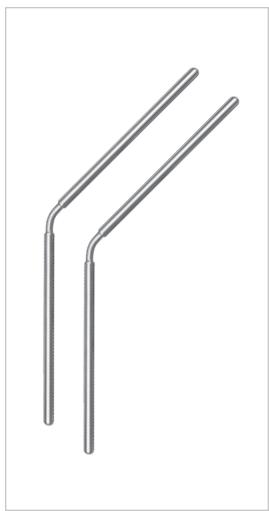


सहायक उत्पाद

INFINITE HEIGHT रेल क्लैंप

IHRC को सूक्ष्मजीवहीन ड्रेप पर रखें और निचली धुंडी को घड़ी की दिशा में घुमा कर करें। पोस्ट को सरकाते हुए वांछित ऊंचाई पर लाएं और हैंडल को घड़ी की दिशा में घुमा कर करें।


ध्यान दें: जब फ्रेम के घटक जड़े हुए हों तो IHRC की ऊंचाई बदलने की कोशिश तब तक न करें जब तक कि आप फ्रेम के घटकों के भार को अपने हाथ से सहारा न दे रहे हों। यदि सहारा नहीं दिया गया तो ऊंचाई बदलने की कोशिशों के दौरान पोस्ट आसानी से नहीं सरकेगा।

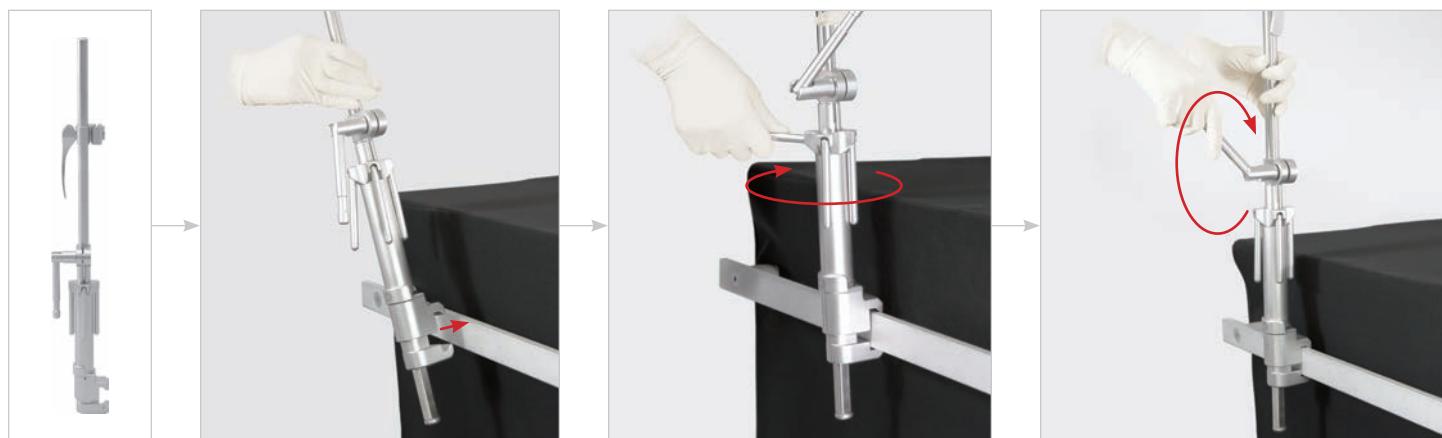

रेल एक्सटेंडर

रेल एक्सटेंडर को सूक्ष्मजीवहीन ड्रेप के ऊपर रेल पर रखें और धुंडी को घड़ी की दिशा में घुमा कर करें। कस जाने पर, Thompson रेल क्लैंप जोड़ा जा सकता है।

ध्यान दें: रेल एक्सटेंडर केवल Thompson Retractor जोड़ने के लिए ही है। अन्य रिट्रैक्टर के साथ इसका उपयोग न करें क्योंकि हो सकता है कि यह उनके साथ संगत न हो।

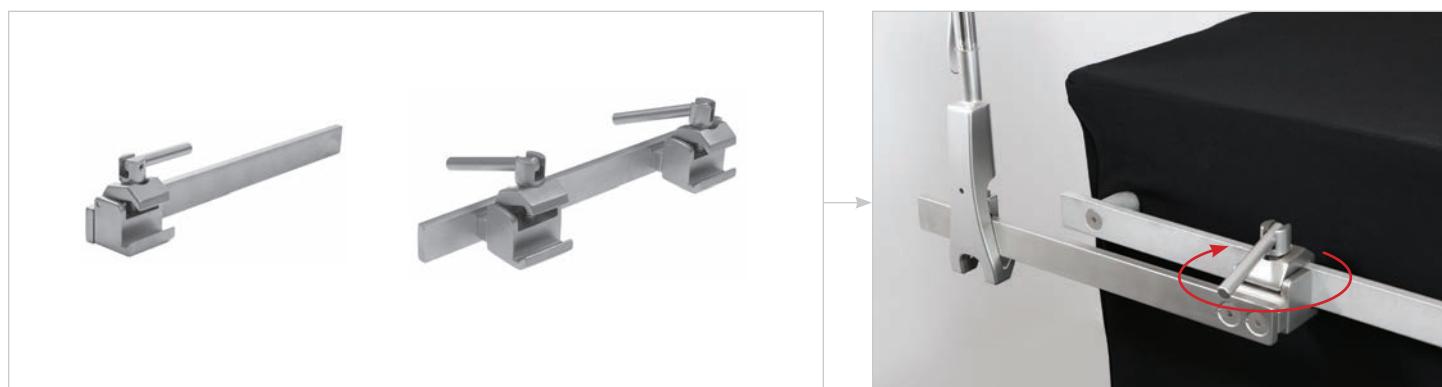

जैकसन फ्रेम अडैप्टर

जैकसन फ्रेम अडैप्टर को टेबल पर रखें और धुंडी को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए करें। कस जाने पर, Thompson रेल क्लैंप जोड़ा जा सकता है।


ध्यान दें: जैकसन फ्रेम अडैप्टर केवल Thompson Retractor जोड़ने के लिए ही है। अन्य रिट्रैक्टर के साथ इसका उपयोग न करें क्योंकि हो सकता है कि यह उनके साथ संगत न हो।



हैंडल + ब्लेड

S-LOCK® हैंडल + ब्लेड

प्लंजर को दबा कर और ब्लेड निपल को घुसा कर ब्लेड को हैंडल से जोड़ें। ब्लेड को मुक्त करके 'स्वाइवल' (घूमने) और 'लॉकड' स्थितियों के बीच अदल-बदल के लिए प्लंजर को दबाएं।

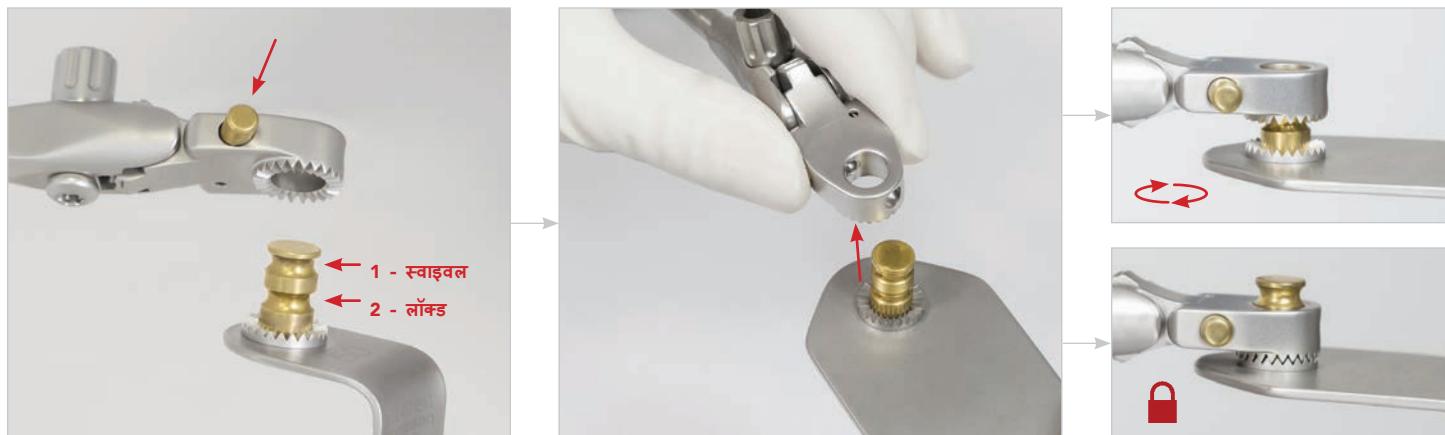


विचक एंगल हैंडल

ब्लेड को हाथ से या टी-हैंडल से 45° तक ऊपर या नीचे किया जा सकता है।



MICRO-ADJUSTABLE हैंडल


Micro-Adjustable हैंडल घुंडी को घड़ी की दिशा में घुमा कर ब्लेड को और भी पीछे खींचें। पाँल को दबा कर तनाव में फिलाई दें।

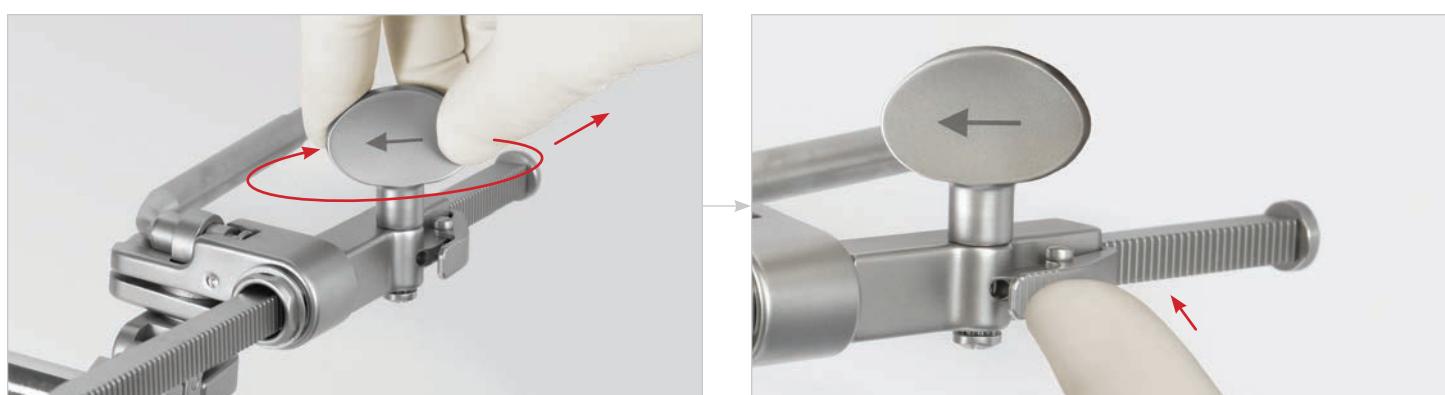

हैंडल + ब्लेड (जारी)


क्लिप-ऑन हैंडल जोड़ना

जॉइंट को अनलॉक्ड स्थिति में रखते हुए, उसे वांछित स्थान पर फ्रेम से क्लिप कर दें, ब्लेड को चीरे में सही स्थान पर लाएं, और कैम जॉइंट को पलट कर उसके स्थान पर लॉक कर दें।

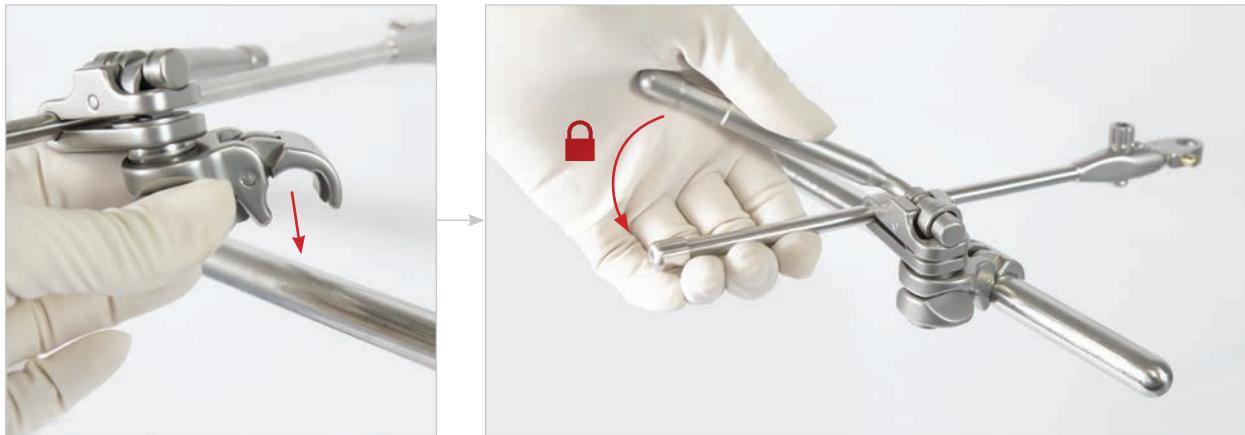


क्लिप-ऑन हैंडल हटाना

कैम जॉइंट हैंडल को पलट कर अनलॉक्ड स्थिति में लाएं, कैम जॉइंट के पिछले भाग को अंगूठे और तर्जनी से झींचें, और हल्के से ऊपर की ओर उठाते हुए आर्म से अलग कर लें।

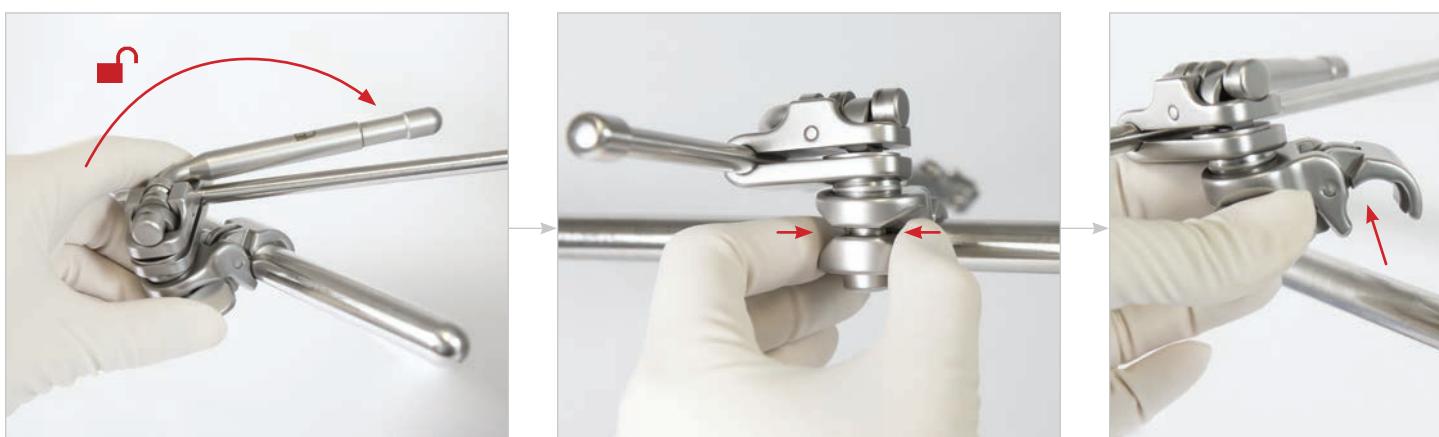

हैंडल + स्लाइड-ऑन जॉइंट विकल्प

यूनिवर्सल जॉइंट को फ्रेम आर्म पर चढ़ाएं/सरकाएं। हैंडल को यूनिवर्सल जॉइंट में सरकाएं, ब्लेड को वांछित स्थान पर लाएं, और जॉइंट की घुंडी घड़ी की दिशा में घुमा कर कस दें।

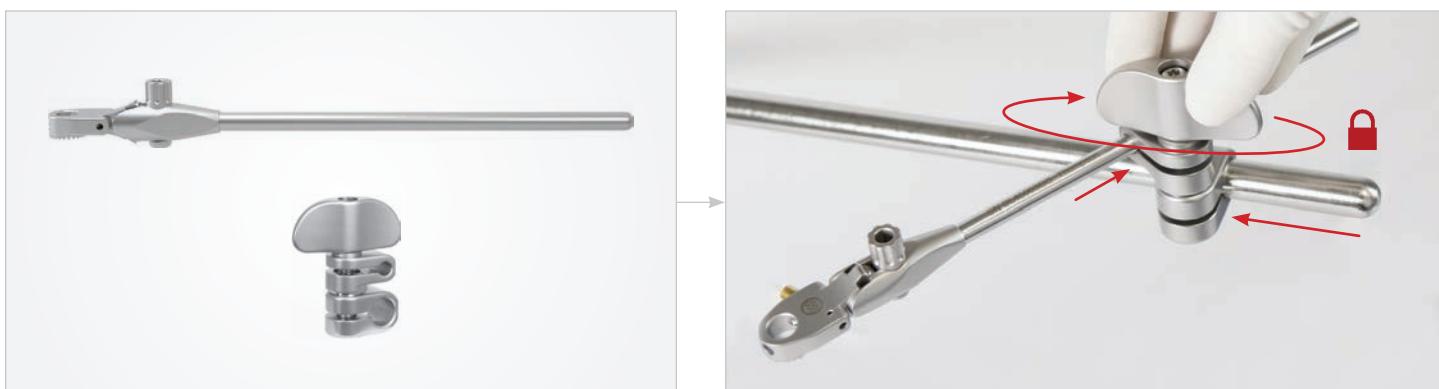

प्रश्न या अतिरिक्त जानकारी:
+1 231 922 0177

Rev E
020320
trum-hi



Uncompromised Exposure

हमसे ऑनलाइन यहां मिलें: THOMPSONSURGICAL.COM



10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
फोन: +1 231.922.0177
फैक्स: +1 231.922.0174
thompson surgical.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
THE NETHERLANDS

© 2020 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock®, PLA®, और "T Circle" लोगोमार्क ट्रम्पसन सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, इन्क. के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।
पैरेट: trpat.com

प्रतीक चिह्न:

		CE 0297		
निमौता	अधिकृत EC प्रतिलिपि	CE शिफ्ट	चेतावनिया / सावधानिया	गैर-सूक्ष्मजीवहीन

CE 0297

Made In
USA